



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74



2118956

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

01.11.2016 № 0111-2137/16

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что на основании информации, поступившей от Московского представительства «Страйкер Остеоникс С.А.», заявителя при государственной регистрации медицинского изделия «Инструменты и приспособления для эндопротезирования Stryker: импактор (Trident Universal Impactor/Posicioner)», производства «Хоумедика Остеоникс Корп.», США регистрационное удостоверение от 05.09.2012 № ФСЗ 2012/12848, срок действия не ограничен, производителем принято решение о добровольном отзыве некоторых лотов медицинского изделия (см. Приложение).

Причина отзыва: «Резьба выступает за пределы чаши пробного вертлужного проводника или импланта. Было установлено, что прессовая посадка между шпилькой с резьбой и импактором (Trident Universal Impactor/Positioner) может привести в будущем к постепенному выступанию шпильки с резьбой.»

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в Московское представительство «Страйкер Остеоникс С.А.» (123242, Москва ул.Баррикадная, д. 8, стр.6, тел. +7(495) 254-87-44, факс +7(495) 254-78-72).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести мероприятия по проверке наличия указанного медицинского изделия и предотвращению его обращения, результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашк

014-2137/176 от 01.11.2016

stryker

EEMEA

Московское представительство

Страйкер Остеоникс С.А.

123242, Москва, ул. Баррикадная д. 8, строение 6,

тел. : +7 (499) 254-87-44, +7 (499) 254-78-72

www.stryker.com

31.08.2016

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О СРОЧНОМ ОТЗЫВЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ИМПАКТОР (Trident Universal Impactor/Positioner)**

Меры в отношении продукции на местах №: RA 2016-107

Описание: импактор (Trident Universal Impactor/Positioner)

Номер в каталоге: 2101-0200

Коды партии: см. прилагаемый перечень

Уважаемый Дистрибьютор,

Компания Stryker Orthopaedics начала добровольный отзыв отдельных партий импактора (Trident Universal Impactor/Positioner). Настоящее письмо содержит перечень всех известных потенциальных рисков, связанных с использованием данного инструмента и методы снижения рисков.

Проблема:

Компания Stryker Orthopaedics получила сообщения о том, что резьба выступает за пределы чаши пробного вертлужного проводника или импланта. По итогам проверки было установлено, что прессовая посадка между шпилькой с резьбой и импактором (Trident Universal Impactor/Positioner) (Деталь №: 2101-0200) может привести в будущем к постепенному выступанию шпильки с резьбой.

Потенциальные факторы риска и вреда здоровью:

Потенциальные риски включают:

1. Выступление резьбовой части.
2. Чрезмерное напряжение кости.

Потенциальный вред здоровью включает:

1. Осложнения, связанные с увеличением продолжительности операции на бедренной части срок свыше 15 минут.
2. Перелом в ходе проведения операции.
3. Снижение первоначальной подвижности в ходе послеоперационной реабилитации.
4. Перипротезный перелом.
5. Боли, связанные с расшатыванием импланта.

Stryker Osteonics SA

Московское представительство
Страйкер Остеоникс С.А.

123242, Москва, ул. Баррикадная д. 8, строение 6,
тел. : +7 (499) 254-87-44, +7 (499) 254-78-72

www.stryker.com

Снижение риска:

Процедура поверки устройств многократного использования, описанная в Инструкции по очистке, стерилизации, проверке и техническому обслуживанию ортопедических медицинских изделий компании Stryker (LSTPI-B, Ред. 2), предусматривает, что «изделия, которые могут устанавливаться вплотную, должны быть проверены на отсутствие повреждений, влекущих их неисправность», и что «стыковочные устройства должны быть проверены на качество сборки». Выполнение данных проверок в соответствии с инструкциями может выявить выступающие резьбовые части до использования инструмента в хирургических операциях, что позволит снизить все риски нанесения вреда здоровью.

Кроме того, пользователь может заметить выступающую резьбовую часть при сборке импактора (Trident Universal Impactor/Positioner) с проводником или имплантом. Выступающая резьбовая часть может быть обнаружена при сборке инструмента с проводником в ходе проводки, когда инструмент соединяется с имплантом, и/или на ранних этапах установки вплотную.

Обнаружение выступающей резьбовой части хирургом при сборке импактора (Trident Universal Impactor/Positioner) с проводником или имплантом может снизить количество случаев возможного нанесения вреда здоровью до 2 - 5.

Требуемые действия:

1. Незамедлительно определите наличие вышеозначенных инструментов по внутренней описи и изолируйте их.
2. Распространите данное Уведомление о безопасности в рамках организации всем заинтересованным или затрагиваемым лицам.
3. Продолжайте распространять информацию о данном Уведомлении в рамках организации до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые в связи с этим действия.
4. Проинформируйте Страйкер, если хотя бы одно из перечисленных изделий было поставлено в другие организации.
 - а) Предоставьте контактные детали, что бы Страйкер мог проинформировать получателей.
 - б) В случае, если Вы являетесь дистрибьютором, примите во внимание, что ответственность за уведомление клиентов ложится на Вас.
5. Просьба проинформировать компанию Stryker о неблагоприятных событиях, связанных с использованием рассматриваемого инструмента. Соблюдайте все местные правила, касающиеся доклада о неблагоприятных событиях в местные компетентные органы.
6. Заполните прилагаемую форму отзыва клиента. Просьба заполнить и отправить данную форму и в том случае, если у вас отсутствуют поврежденные инструменты для возврата. Таким образом вы избавите компанию Stryker от необходимости оправки напоминания.
7. Перешлите заполненную форму Вашему представителю Страйкер (контакты указаны ниже). После получения данной формы, представитель Страйкер всяжется с Вами для инициирования дальнейших действий.

Московское представительство

Страйкер Остеоникс С.А.

123242, Москва, ул. Баррикадная д. 8, строение 6,

тел. : +7 (499) 254-87-44, +7 (499) 254-78-72

www.stryker.com

В соответствии с нашими документами учета вы получили вышеуказанный инструмент. Мы должны убедиться, что заказчики, которые могли приобрести заявленный инструмент, получили вышеуказанную важную информацию. Просим помочь нам выполнить наши предусмотренные законом обязательства, отправив обратно по факсу прилагаемую Форму подтверждения получения уведомления в течение 5 дней.

Приносим извинения за причиненные неудобства. В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь со мной по телефону, указанному ниже.

С уважением,

Елена Чуднова

Отдела нормативно-правового регулирования по России и Казахстану

+7 495 785 07 68

Московское представительство

Страйкер Остеоникс С.А.

123242, Москва, ул. Баррикадная д. 8, строение 6,

тел. : +7 (499) 254-87-44, +7 (499) 254-78-72

www.stryker.com

**STRYKER ORTHOPAEDICS
СРОЧНЫЙ ОТЗЫВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ**

Меры в отношении продукции на местах №: RA 2016-107

Описание: импактор (Trident Universal Impactor/Positioner)

Номер в каталоге: 2101-0200

Коды партии: См. прилагаемый перечень

Я получил письмо об отзыве продукта от компании Stryker Orthopaedics от 26 августа 2016 г. о том, что компания инициировала добровольный отзыв в отношении партии вышеуказанного инструмента.

Наименование филиала компании Stryker/ больницы

Дата

Имя представителя филиала компании Stryker/агента/менеджера по рискам/больницы:
(Подпись)

ПРОСИМ ВАС ЗАПОЛНИТЬ ДАННУЮ ФОРМУ В ТЕЧЕНИЕ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ И ОТПРАВИТЬ ЕЕ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИЛИ ФАКС. УКАЗАННЫЕ НИЖЕ:

адрес электронной почты:

elena.chudnova@stryker.com

Московское представительство
Страйкер Остеоникс С.А.

123242, Москва, ул. Баррикадная д. 8, строение 6,
тел. : +7 (499) 254-87-44, +7 (499) 254-78-72

www.stryker.com

EEMEA

Позиции, подлежащие отзыву в рамках RA 2016-107

| Каталожный номер | Лот номер | Каталожный номер | Лот номер | Каталожный номер | Лот номер |
|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 2101-0200 | SMM7A00 | 2101-0200 | SMM7M00A | 2101-0200 | SMM8C00J |
| 2101-0200 | SMM7A00L | 2101-0200 | SMM7M02H | 2101-0200 | SMM8L05 |
| 2101-0200 | SMM7A02 | 2101-0200 | SMM7M02 | 2101-0200 | SMM8L05A |
| 2101-0200 | SMM7A02A | 2101-0200 | SMM7E02M | 2101-0200 | SMM8L02X |
| 2101-0200 | SMM7A02E | 2101-0200 | SMM7E01JK | 2101-0200 | SMM8L04 |
| 2101-0200 | SMM7A02EE | 2101-0200 | SMM7K03J | 2101-0200 | SMM6N00 |
| 2101-0200 | SMM7A01T | 2101-0200 | SMM7K00A | 2101-0200 | SMM6N01 |
| 2101-0200 | SMM7A01TT | 2101-0200 | SMM6N04 | 2101-0200 | SMM6N01A |
| 2101-0200 | SMM7A01TD | 2101-0200 | SMM7N01J | 2101-0200 | SMM6N02 |
| 2101-0200 | SMM7A01TDD | 2101-0200 | SMM7N01 | 2101-0200 | SMM6N03 |
| 2101-0200 | SMM7C02H | 2101-0200 | SMM7M06 | 2101-0200 | SMM6N04A |
| 2101-0200 | SMM7C02 | 2101-0200 | SMM7M09 | 2101-0200 | SMM8L07T |
| 2101-0200 | SMM7C01 | 2101-0200 | SMM7N03 | 2101-0200 | SMM8L08 |
| 2101-0200 | SMM7C01T | 2101-0200 | SMM7N03A | 2101-0200 | SMM8M00K |
| 2101-0200 | SMM7C01TT | 2101-0200 | SMM7M06A | 2101-0200 | SMM8M00L |
| 2101-0200 | SMM7C01W | 2101-0200 | SMM7M09 | 2101-0200 | SMM8M01 |
| 2101-0200 | SMM7E03 | 2101-0200 | SMM7N00 | 2101-0200 | SMM8M01E |
| 2101-0200 | SMM7E03A | 2101-0200 | SMM7M05 | 2101-0200 | SMM8M01EE |
| 2101-0200 | SMM7E00 | 2101-0200 | SMM7M08A | 2101-0200 | SMM8N02 |
| 2101-0200 | SMM7A00E | 2101-0200 | SMM7M10 | 2101-0200 | SMM8N02A |
| 2101-0200 | SMM7E02 | 2101-0200 | SMM7N00A | 2101-0200 | SMM8M01A |
| 2101-0200 | SMM7E02A | 2101-0200 | SMM7N02L | 2101-0200 | SMM8N00 |
| 2101-0200 | SMM7E01 | 2101-0200 | SMM7M05J | 2101-0200 | SMM8N00A |
| 2101-0200 | SMM7E01A | 2101-0200 | SMM7M08 | 2101-0200 | SMM8N00D |
| 2101-0200 | SMM7K00 | 2101-0200 | SMM7N02 | 2101-0200 | SMM8N01 |
| 2101-0200 | SMM7K01 | 2101-0200 | SMM7N04 | 2101-0200 | SMM8N01A |
| 2101-0200 | SMM7K01A | 2101-0200 | SMM7N04J | 2101-0200 | SMM8N01T |
| 2101-0200 | SMM7K03 | 2101-0200 | SMM8C00 | 2101-0200 | SMM8S00 |
| 2101-0200 | SMM7K03L | 2101-0200 | SMM7M01R | 2101-0200 | SMM8S00T |
| 2101-0200 | SMM7K02 | 2101-0200 | SMM7M01RW | 2101-0200 | SMM8S00TT |
| 2101-0200 | SMM7K02T | 2101-0200 | SMM7M01W | 2101-0200 | SMM8S01 |
| 2101-0200 | SMM7K03X | 2101-0200 | SMM7M07 | 2101-0200 | SMM8S01A |
| 2101-0200 | SMM7K03Y | 2101-0200 | SMM7M07J | 2101-0200 | SMM8S01D |

Московское представительство
Страйкер Остеоникс С.А.

123242, Москва, ул. Баррикадная д. 8, строение 6.

тел. : +7 (499) 254-87-44, +7 (499) 254-78-72

www.stryker.com

EEMEA

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 2101-0200 | SMM7C02J | 2101-0200 | SMM6C00 | 2101-0200 | SMM8T00 |
| 2101-0200 | SMM7L00H | 2101-0200 | SMM7M03 | 2101-0200 | SMM8N02T |
| 2101-0200 | SMM7L00J | 2101-0200 | SMM7M03A | 2101-0200 | SMM8S02 |
| 2101-0200 | SMM7L00K | 2101-0200 | SMM7M03D | 2101-0200 | SMM8V00 |
| 2101-0200 | SMM7L00 | 2101-0200 | SMM7M03E | 2101-0200 | SMM8V00A |
| 2101-0200 | SMM7C01TW | 2101-0200 | SMM7M03L | 2101-0200 | SMM8V00E |
| 2101-0200 | SMM7M01 | 2101-0200 | SMM7M04 | 2101-0200 | SMM8T00A |
| 2101-0200 | SMM7A02T | 2101-0200 | SMM7M04L | 2101-0200 | SMM8V01 |
| 2101-0200 | SMM7M00 | 2101-0200 | SMM7M03K | 2101-0200 | SMM8V01A |
| 2101-0200 | SMM8W02 | 2101-0200 | SMM8L01 | 2101-0200 | SMM8V01D |
| 2101-0200 | SMM8W03A | 2101-0200 | SMM8L03 | 2101-0200 | SMM8V05 |
| 2101-0200 | SMM8V02 | 2101-0200 | SMM8L07 | 2101-0200 | SMM8V06 |
| 2101-0200 | SMM8W01 | 2101-0200 | SMM8L00T | 2101-0200 | SMM8V04 |
| 2101-0200 | SMM8W01A | 2101-0200 | SMM8L06 | 2101-0200 | SMM8V03 |
| 2101-0200 | SMM8W02X | 2101-0200 | SMM9A05 | 2101-0200 | SMM9H00E |
| 2101-0200 | SMM8W03M | 2101-0200 | SMM9A06 | 2101-0200 | SMM9H00EE |
| 2101-0200 | SMM8W03P | 2101-0200 | SMM9A06E | 2101-0200 | SMM9H00K |
| 2101-0200 | SMM8W04 | 2101-0200 | SMM9A07 | 2101-0200 | SMM9H00L |
| 2101-0200 | SMM8W04A | 2101-0200 | SMM9A08 | 2101-0200 | SMM9H00V |
| 2101-0200 | SMM8W05 | 2101-0200 | SMM9A12 | 2101-0200 | SMM9K00 |
| 2101-0200 | SMM8W05A | 2101-0200 | SMM9A12J | 2101-0200 | SMM9K01 |
| 2101-0200 | SMM8W03D | 2101-0200 | SMM9A12T | 2101-0200 | SMM9K01AT |
| 2101-0200 | SMM8W03 | 2101-0200 | SMM9A09 | 2101-0200 | SMM9K01T |
| 2101-0200 | SMM8W05D | 2101-0200 | SMM9A09K | 2101-0200 | SMM9K01TT |
| 2101-0200 | SMM8W00A | 2101-0200 | SMM9A09L | 2101-0200 | SMM9K02A |
| 2101-0200 | SMM8W00E | 2101-0200 | SMM9A10 | 2101-0200 | SMM9K03 |
| 2101-0200 | SMM8W00J | 2101-0200 | SMM9A11 | 2101-0200 | SMM9K02 |
| 2101-0200 | SMM8W00K | 2101-0200 | SMM9A11D | 2101-0200 | SMM9K04 |
| 2101-0200 | SMM8W00 | 2101-0200 | SMM9A07L | 2101-0200 | SMM9L00 |
| 2101-0200 | SMM8V02J | 2101-0200 | SMM9E01 | 2101-0200 | SMM9L01 |
| 2101-0200 | SMM8W00D | 2101-0200 | SMM9E02 | 2101-0200 | SMM9L02 |
| 2101-0200 | SMM8V07 | 2101-0200 | SMM9E02A | 2101-0200 | SMM9L02A |
| 2101-0200 | SMM8W06H | 2101-0200 | SMM9E03 | 2101-0200 | SMM9L02E |
| 2101-0200 | SMM8W05H | 2101-0200 | SMM9E00 | 2101-0200 | SMM9L02M |
| 2101-0200 | SMM8W00H | 2101-0200 | SMM9C00A | 2101-0200 | SMM9L03 |
| 2101-0200 | SMM8W07 | 2101-0200 | SMM9C00D | 2101-0200 | SMM9L03A |
| 2101-0200 | SMM8W07K | 2101-0200 | SMM9C00 | 2101-0200 | SMM9L03D |
| 2101-0200 | SMM8W07L | 2101-0200 | SMM9C00J | 2101-0200 | SMM9L03E |
| 2101-0200 | SMM8W08 | 2101-0200 | SMM9C00K | 2101-0200 | SMM9L04 |
| 2101-0200 | SMM8W08E | 2101-0200 | SMM9E05A | 2101-0200 | SMM9L04D |

Московское представительство
Страйкер Остеоникс С.А.

123242, Москва, ул. Баррикадная д. 8, строение 6,
тел. : +7 (499) 254-87-44, +7 (499) 254-78-72

www.stryker.com

EEMEA

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2101-0200 | SMM8W07A | 2101-0200 | SMM9E04 | 2101-0200 | SMM9L04E |
| 2101-0200 | SAMPLE25 | 2101-0200 | SMM9E04A | 2101-0200 | SMM9L05 |
| 2101-0200 | SMM8W08EE | 2101-0200 | SMM9E04D | 2101-0200 | SMM9L04A |
| 2101-0200 | SMM9A00 | 2101-0200 | SMM9E04E | 2101-0200 | SMM9L07 |
| 2101-0200 | SMM9A00R | 2101-0200 | SMM9E05 | 2101-0200 | SMM9L07A |
| 2101-0200 | SMM9A00T | 2101-0200 | SMM9E04T | 2101-0200 | SMM9L09 |
| 2101-0200 | SMM9A01 | 2101-0200 | SMM9E04TT | 2101-0200 | SMM9L09A |
| 2101-0200 | SMM9A01E | 2101-0200 | SMM9E06 | 2101-0200 | SMM9L09D |
| 2101-0200 | SMM9A01EL | 2101-0200 | SMM9E06A | 2101-0200 | SMM9V00 |
| 2101-0200 | SMM9A02 | 2101-0200 | SMM9E06D | 2101-0200 | SMM9V02 |
| 2101-0200 | SMM9A02E | 2101-0200 | SMM9A03HD | 2101-0200 | SMM9V02A |
| 2101-0200 | SMM9A03 | 2101-0200 | SMM9A12X | 2101-0200 | SMM9V02B |
| 2101-0200 | SMM9A03K | 2101-0200 | SMM9H01 | 2101-0200 | SMM9V05 |
| 2101-0200 | SMM9A03L | 2101-0200 | SMM9H01A | 2101-0200 | SMM9V07 |
| 2101-0200 | SMM9A03P | 2101-0200 | SMM9H01T | 2101-0200 | SMM9V08A |
| 2101-0200 | SMM9A04 | 2101-0200 | SMM9H01K | 2101-0200 | SMM9V08 |
| 2101-0200 | SMM9L09E | 2101-0200 | SMM9N07JK | 2101-0200 | SMM9V08AA |
| 2101-0200 | SMM9L10 | 2101-0200 | SMM9N07N | 2101-0200 | SMM9V06 |
| 2101-0200 | SMM9L08 | 2101-0200 | SMM9T01 | 2101-0200 | SMM9V09J |
| 2101-0200 | SMM9L08A | 2101-0200 | SMM9T00 | 2101-0200 | SMM9V04 |
| 2101-0200 | SMM9A09P | 2101-0200 | SMM9T00A | 2101-0200 | SMM9V09 |
| 2101-0200 | SMM9K01L | 2101-0200 | SMM9T02 | 2101-0200 | SMM9V09A |
| 2101-0200 | SMM9L06 | 2101-0200 | SMM8V07A | 2101-0200 | SMM9V09K |
| 2101-0200 | SMM9M01L | 2101-0200 | SMM7E01T | 2101-0200 | SMM9V03 |
| 2101-0200 | SMM9M01 | 2101-0200 | SMM7K01AA | 2101-0200 | SMM9V02E |
| 2101-0200 | SMM9M01A | 2101-0200 | SMM9T00K | 2101-0200 | SMM9V02H |
| 2101-0200 | SMM9M03 | 2101-0200 | SMM9T00J | 2101-0200 | SMM9V02K |
| 2101-0200 | SMM9M03A | 2101-0200 | SMM9T03 | 2101-0200 | SMM9V09E |
| 2101-0200 | SMM9M03D | 2101-0200 | SMM9T03A | 2101-0200 | SMM9V09L |
| 2101-0200 | SMM9M03E | 2101-0200 | SMM9T03D | 2101-0200 | SMM9V09LE |
| 2101-0200 | SMM9M02 | 2101-0200 | SMM8W01AA | 2101-0200 | SMM9V09LL |
| 2101-0200 | SMM9M02A | 2101-0200 | SMM9T03N | 2101-0200 | SMM9V00HJ |
| 2101-0200 | SMM9M02L | 2101-0200 | SMM9T03L | 2101-0200 | SMM9V00JH |
| 2101-0200 | SMM9M00 | 2101-0200 | SMM9T03M | 2101-0200 | SMM9V00H |
| 2101-0200 | SMM9L10A | 2101-0200 | SMM8W00M | 2101-0200 | SMM9N03 |
| 2101-0200 | SMM9N02M | 2101-0200 | SMM8V01T | 2101-0200 | SMM9N04 |
| 2101-0200 | SMM9N02 | 2101-0200 | SMM8V07T | 2101-0200 | SMM9N06 |
| 2101-0200 | SMM9N00 | 2101-0200 | SMM8W00T | 2101-0200 | SMM9N06A |
| 2101-0200 | SMM9N00X | 2101-0200 | SMM8V03T | 2101-0200 | SMM9N07 |
| 2101-0200 | SMM9N00Y | 2101-0200 | SMM8V05T | 2101-0200 | SMM9N08 |

Московское представительство

Страйкер Остеоникс С.А.

123242, Москва, ул. Баррикадная д. 8, строение 6,

тел. : +7 (499) 254-87-44, +7 (499) 254-78-72

www.stryker.com

EEMEA

| | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2101-0200 | SMM9N02K | 2101-0200 | SMM8V07TT | 2101-0200 | SMM9N08E |
| 2101-0200 | SMM9N02J | 2101-0200 | SMM9V01 | 2101-0200 | SMM9N07A |
| 2101-0200 | SMM9N01 | 2101-0200 | SMM9V01A | 2101-0200 | SMM9N07AA |
| 2101-0200 | SMM9N01A | 2101-0200 | SMM9V01T | 2101-0200 | SMM9N08A |
| 2101-0200 | SMM9N01J | 2101-0200 | SMM9V01D | 2101-0200 | SMM9N08D |
| 2101-0200 | SMM9N05A | 2101-0200 | SMM9V01J | 2101-0200 | SMM9N06T |
| 2101-0200 | SMM9N05 | 2101-0200 | SMM9V01X | 2101-0200 | SMM9N06TA |
| 2101-0200 | SMM9N05D | 2101-0200 | SMM9V00A | 2101-0200 | SMM9N07M |
| 2101-0200 | SMM9N07J | | | | |